




## 高血压五项组合实验室检测抽血推荐流程

涵盖肾素、醛固酮、血管紧张素 II 的立卧位实验和皮质醇、促肾上腺皮质激素的节律试验


步骤一、早上五点采集两管卧位血（紫帽 5ml，特殊蓝帽 4ml），此标本可做肾素、醛固酮、血管紧张素 II 的卧位试验。

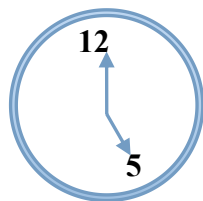

步骤二、叮嘱病人直立位或步行 2 小时（可靠墙，不可以坐），7:00-9:00 采集两管立位血（紫帽 5ml，特殊蓝帽 4ml），同时也可做皮质醇、促肾上腺皮质激素的节律试验（上午 7-9 点）。

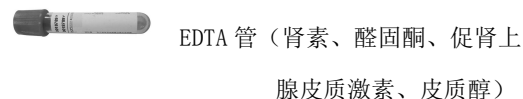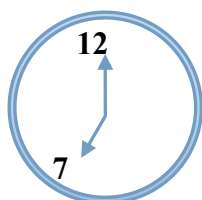


步骤三、下午 3:30-4:30 采集一管静脉血（紫帽 5ml），此标本为皮质醇、促肾上腺皮质激素的节律试验（下午 3-5 点）。

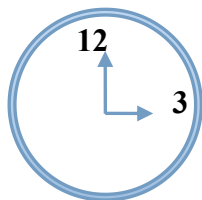

EDTA 管（促肾上腺皮质激素、皮质醇）

步骤四、临床根据病人情况，可在午夜（或入睡后 3-5 小时）再次采集一管静脉血（紫帽 5ml），为皮质醇、促肾上腺皮质激素的节律试验（午夜）。

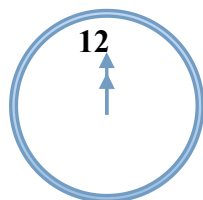

EDTA 管（促肾上腺皮质激素、皮质醇）

注意：①所有立卧位必须在上午抽血。建议空腹，低盐饮食，输液前抽完。

②节律试验应严格遵守抽血时间。

③无法直立行走的患者可选择步骤二和三进行卧位采血。

④请在条码上写清抽血时的体位及抽血时间！